



БЕБЕCONFORT Електрически бебешки аспиратор за нос

Инструкции за употреба

Фигура 1 Фигура 2 Фигура 3 Фигура 4

ДА НЕ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БЕБЕШКИ АСПИРАТОР ЗА НОС

Бебето често има запушен или течащ нос, но до тригодишна възраст то не може само да си издуха носа. Електрическият бебешки аспиратор за нос ефективно почиства секрета и назалната слуз, която запушва носа на бебето и затруднява дишането (затруднено заспиване, проблеми с храненето...).

Не използвайте уреда за нищо друго.

Не използвайте бебешкия назален аспиратор, ако носните проходи са раздразнени.

В случай на инфекция се препоръчва консултация с лекар.

Моля, обърнете внимание на тези инструкции преди употреба и ги съхранявайте на сигурно място за по-късна справка.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги съхранявайте на сигурно място за бъдещи справки.

ПОДРОБНА СХЕМА НА УРЕДА (фигура 1)

- 1 - Накрайници за многократна употреба (x3)
- 2 - Резервоар
- 3 - Бутон ВКЛ. (ON)
- 4 - Отделение за батерии

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИ (фигура 2)

Отворете отделението за батерии, като развийте винта. Поставете две алкални батерии AA 1,5 V в предвидената камера, като вземете предвид указаната полярност. Затворете капака отново и заключете.

Предупреждение относно батериите:

- Запазете тези инструкции, защото съдържат важна информация.
- Не смесвайте използвани и нови батерии.
- Не смесвайте алкални батерии, стандартни (въглеродно-цинкови) батерии и презареждаеми (никел-кадмиеви) батерии.
- Не зареждайте незареждащи се батерии.
- Преди да поставите батериите се уверете, че всички контактни повърхности са чисти.
- Отстранявайте батериите, когато устройството не се използва за дълги периоди от време.
- Когато звукът на помпата и/или засмукването на помпата отслабне, батериите трябва да се сменят.
- Използваните батерии трябва да се предадат в подходящо място за събиране.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА БЕБЕШКИЯ НАЗАЛЕН АСПИРАТОР (фигура 3)

Внимателно поставете върха на входа на запушената ноздра, без да влиза в носа.

Натиснете бутона ON, за да започнете засмукването. Само няколко секунди са необходими за отстраняване на секретите (максимум 5 секунди). За максимална ефективност носът трябва да бъде наклонен надолу и уредът трябва да образува ъгъл 45°. Не използвайте носния аспиратор, когато детето лежи. Бутонът ON трябва да сочи нагоре.

След употреба събраният носен секрет остава в резервоара.

Изпразвайте и почиствайте резервоара и накрайника след всяка употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

За по-голяма ефективност на продукта, най-добре е да се запущва другата ноздра по време на аспирация. Използвайте физиологичен разтвор заедно с бебешкия аспиратор за нос, за по-добро изчистване на секретите. Докато аспирирате се уверете, че устата на бебето е отворена за намаляване на налягането във вътрешното ухо. Внимавайте да не засмучете стената на носа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА (Фигура 4)

Разглобяване:

Дюзата и резервоарът се предлагат като една цяла част, което улеснява отделянето от аспиратора, за да може да се почистят старателно след всяка употреба. Издърпайте нагоре, за да ги извадите от аспиратора за нос, като внимавате да не ги завъртите.

Почистване на накрайника:

Почиствайте в съдомиялна машина, в кошницата за прибори или на горната поставка. Или почистете на ръка със сапунена вода.

Почистване на резервоара:

Почиствайте в съдомиялна машина, в кошницата за прибори или на горната поставка. Или почистете на ръка със сапунена вода.

Почистване на корпуса на аспиратора:

Никога не поставяйте корпуса на уреда във вода или в друга течност, не е водоустойчив. Използвайте мека, суха кърпа, за да почистите корпуса.

Не почиствайте с разтворители или абразивни продукти.

Сглобяване:

При закрепване на резервоара към аспиратора ще чуете „щракване“, когато е на правилното място и маркерът вече не се вижда.

ВАЖНИ ПРЕПОРЪКИ

Преди употреба проверете дали уредът е сглобен правилно.

Не натискайте назалния връх на аспиратора дълбоко в ноздрата на бебето.

Не потапяйте частта от уреда, съдържаща батериите в каквато и да е течност.

Почиствайте уреда след всяка употреба.

Не оставяйте уреда на място, достъпно за деца.

Съхранявайте продукта в суха среда при стайна температура.

Изваждайте батериите, когато уредът остава неизползван дълго време.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Всмукателна мощност: 430 mm/Hg.

Захранване: две батерии 1.5V AA.

Тегло: 150 гр.

Размери: 170x60 мм.

Всмукателен накрайник: еластичен силикон, който може да се мие и използва многократно.

Изисквания за употреба: между 15°C и 35°C.

ГАРАНЦИЯ

Електрическият бебешки аспиратор за нос има две години гаранция от датата на покупката, при нормална употреба. Дорел Франция не носи отговорност за възможни щети, причинени от:

- използване не в съответствие с инструкциите,
- неподходяща, неправилна или неразумна употреба,
- ремонти или модификации, предприети от неоторизирани техници.

Производител: Дорел Недерландс /Dorel Netherlands - Нидерландия, Postdus 6071, 5700 ET Helmond

Дистрибутор: ХИПОЛЕНД АД

1532 София, кв. Казичене,

ул. „Трети Март“ №5; www.hippoland.net

e-mail: office@hippoland.net

Тел: 02 91006;

Произведено в Китай.

